

機器保守管理作業日誌（呼吸機能）

福井大学医学部附属病院検査部		点検実施年月： 年 月						機器名：呼吸機能測定装置 CHESTAC-8900										日付		部門責任者												
検査室名：呼吸機能⑭								管理番号：検査-G-161-200																								
点検項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
日常点検	始業時点検	電源コード、信号ケーブル、ガステューブ、呼吸管					/	/					/	/							/	/					/	/				
		機器の清掃					/	/					/	/							/	/					/	/				
		コンピュータの正常動作、CDBS接続					/	/					/	/							/	/					/	/				
		異常音の確認					/	/					/	/							/	/					/	/				
		画面上の日付・時間					/	/					/	/							/	/					/	/				
		ガスの開栓と残量確認					/	/					/	/							/	/					/	/				
		ソーダライム、シリカゲルの接続確認					/	/					/	/							/	/					/	/				
		環境データ（気温、湿度、気圧）の入力					/	/					/	/							/	/					/	/				
		30分以上の機器ウォーミングアップ					/	/					/	/							/	/					/	/				
	校正シリンジによる精度確認					/	/					/	/						/	/					/	/						
点検者						/	/					/	/						/	/					/	/						
日常点検	終業時点検	電源スイッチOFF					/	/				/	/						/	/					/	/						
		ガスの元栓が閉まっているか					/	/					/	/						/	/					/	/					
		機器の清掃と消毒					/	/					/	/						/	/					/	/					
		ガラス管（ソーダライム、シリカゲル）交換					/	/					/	/						/	/					/	/					
		FRC（水曜）・DLCO（月・金曜）精度管理					/	/					/	/						/	/					/	/					
週次点検	被検者による精度管理	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	清掃	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
月次点検	電源コードとプラグの安全点検	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ソーダライムボックス交換	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	サンプルバック・バルーンバック	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ガス分析計の自動校正	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Vリング・ベル内部の清掃	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	精度管理月報印刷	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
点検者						/	/					/	/						/	/					/	/						

備考欄（チェック記号 ✓：正常 ×：調整 △：修理 ○：交換 ☆：その他）